

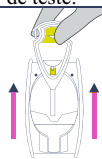


⚠️ Leia Antes de Usar ⚠️


IDenta Touch&Know





Kit Teste de Drogas

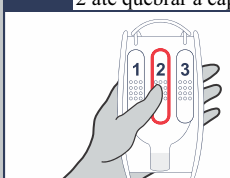

Cartão de Procedimento para IDT 0660 Identificação de **Mefedrona** Substância

Por precaução, deve usar luvas e proteção ocular ao manusear substâncias e usar unidades de teste. Não fure qualquer parte da unidade. Não retire a sonda depois de estar fixa na unidade. No caso improvável de um derrame, lave a área afetada abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

Preparação do Teste	1	Retire a sonda Smart-Tip™ da unidade de teste.	2 Amostra suspeita.	
			Em forma de Pó Encoste o adesivo da Smart Tip™ na amostra. 	Em forma de comprimido Firmemente pressione a Smart-Tip™ no comprimido fazendo movimento circular, até o coletor adesivo estiver coberto de substância. 

Preparação do Teste	3	Bloqueie a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente.	STOP Não continue até que a sonda esteja bloqueada abaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste.	Identificação	4	Com o polegar e o dedo indicador, esprema a câmara 1 até quebrar a cápsula.	5	Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos.
								

Resultados		A aparência de uma cor amarela indica a presença de Mefedrona (4-Metilcatinona) ou um análogo como Catinona, Metilcatinona ou N, N-Dimetilcinon.	
		Se nenhuma cor aparecer, as drogas anteriormente mencionadas não estão presentes.	
		Continue para a Diluição Ácida (etapas 6-9) independentemente de aparecer ou não qualquer cor.	

Diluição Ácida	6	Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 2 até quebrar a cápsula.	7	Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos.
				

Diluição Ácida	8	Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 3 até quebrar a cápsula.	9	Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos.	Eliminação Depois que a diluição ácida estiver completa, o kit de teste agora é seguro para descartar no lixo. 
					

Todos os resultados são presumíveis.

Se necessário, outros testes feitos por um laboratório de teste de drogas competente poderão fornecer identificação adicional.